

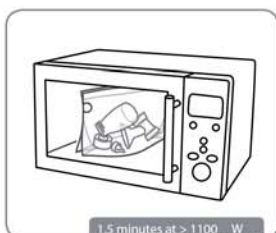
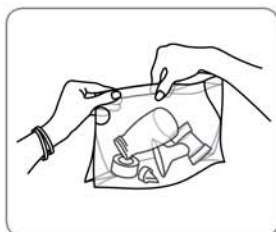
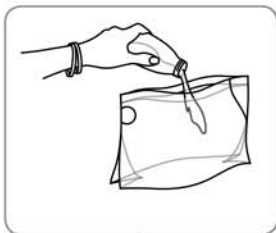


# คู่มือการใช้ถุงซิป Easy Clean สำหรับทำความสะอาดขวดนมและอุปกรณ์ปั๊มนมด้วยไมโครเวฟ

## วิธีการใช้งาน

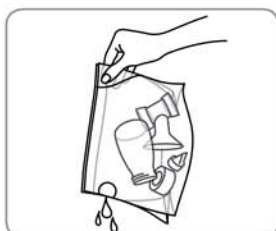

1-5 minutes at > 1100 W  
3 minutes at 800 - 1100 W  
5 minutes at 600 - 750 W

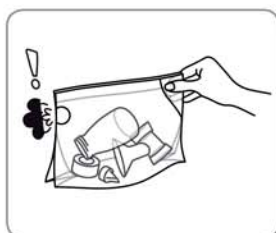

1. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังจากการใช้งานทุกครั้งด้วยน้ำยาล้างขวดนม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
2. เติมน้ำ 60 มิลลิลิตร (2 ออนซ์) ลงในถุงซิป Easy Clean สำหรับทำความสะอาด
3. ใส่อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต้องการจะทำความสะอาดด้วยไอน้ำลงในถุงซิป Easy Clean รีดปากถุงซิปให้สนิท
4. วางถุงซิป Easy Clean ไว้ตรงกลางของไมโครเวฟ
5. ตั้งกำลังไฟและเวลาที่ใช้ของไมโครเวฟให้ถูกต้องดังนี้
  - 1.5 นาทีสำหรับการใช้กำลังไฟที่มากกว่า 1100 วัตต์
  - 3 นาทีสำหรับการใช้กำลังไฟที่ 800-1100 วัตต์
  - 5 นาทีสำหรับการใช้กำลังไฟที่ 600-750 วัตต์
6. เปิดไมโครเวฟเมื่อสิ้นสุดการทำงานและทิ้งให้ถุงซิป Easy Clean เย็นลงอย่างน้อย 2 นาที
7. นำถุงซิป Easy Clean ออกจากไมโครเวฟโดยใช้อุปกรณ์สำหรับการจับ
8. ถูถุงซิป Easy Clean ให้ห่างจากตัว และค่อยๆ เทน้ำออกอย่างระมัดระวัง
9. เปิดปากถุงซิป Easy Clean และนำอุปกรณ์ทุกชิ้นออกจากถุง

ถุงซิป Easy Clean สามารถใช้ได้ถึง 20 ครั้ง ให้ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหลังจากการใช้ทุกครั้งเพื่อที่จะทำให้ทราบจำนวนครั้งที่เหลือ

## คำเตือน

- > เติมน้ำอย่างน้อย 60 มิลลิลิตร ( 2 ออนซ์ ) ลงในถุงซิป Easy Clean ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของอุปกรณ์
- > ไม่เติมน้ำลงในถุงซิป Easy Clean จนล้น
- > ไม่วางถุงซิป Easy Clean บนภาชนะโลหะ ในไมโครเวฟ
- > ไม่ใช้เวลาในการทำทำความสะอาดด้วยไอน้ำเกินกว่าเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหาย
- > ในกรณีที่ไมโครเวฟไม่มีจานหมุน ให้กลับด้านถุงซิป Easy Clean เมื่อระยะเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กำหนด
- > ข้อควรระวัง : เมื่อนำถุงซิป Easy Clean ออกจากไมโครเวฟและเปิดปากถุง อาจจะมีไอร้อนหรือน้ำออกจากถุงซิป Easy Clean
- > ใช้ถุงซิป Easy Clean กับอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
- > ไม่ใช้ถุงซิป Easy Clean กับเตาอบ และไม่นำถุงซิป Easy Clean ไปย่าง
- > เก็บถุงซิป Easy Clean ให้พ้นจากมือเด็ก
- > เพื่อป้องกันคราบหินปูน สามารถหยดน้ำส้มสายชู 1 หยดลงไปได้น้ำได้
- > บางส่วนของอุปกรณ์อาจเปลี่ยนสีได้เนื่องจากการใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน
- > ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของไมโครเวฟ